



**Clic droit sur une image pour accéder à toutes les fonctionnalités de SYNAPSE**

Manipulation des images	
Défilement des outils : Fenêtrage, Zoom et Déplacement	CLIC GCHE MAINTENU+ CLIC DROIT X3
Défilement des images	MOLETTE DE LA SOURIS
Défilement des quadrants mammaires	TOUCHE « Q » DU CLAVIER
Modification du format de découpe	<b>CTRL</b> + MOLETTE SOURIS
<b>ZOOM</b> à 1	TOUCHE « = » ET CLIC SUR L'IMAGE
<b>ZOOM</b> initial	TOUCHE « - » ET CLIC SUR L'IMAGE
Afficher le groupe d'images suivant	ALT + TOUCHE « S »
Afficher le groupe d'images précédent	ALT + TOUCHE « A »
Mesures	
Mesurer une distance (Règle)	<b>R</b> + CLIC GAUCHE
Mesurer un angle	<b>G</b> + CLIC GAUCHE
Divers	
Retour aux paramètres initiaux de l'examen	<b>F5</b>
Retour au constate initial de l'image	<b>9</b>
Loupe ponctuelle	<b>O</b> + CLIC GAUCHE
Sélection image pertinente (Marquer l'image)	<b>B</b> + CLIC SUR L'IMAGE
Insérer du texte	<b>T</b> + CLIC GAUCHE
Comparaison d'examens	
Comparaison automatique de l'examen de même modalité, le plus proche chronologiquement de celui qui est affiché.	ALT + <b>C</b>
Arrêter une comparaison	ALT + <b>X</b>