

Dossier patient - antériorité et comparaison d'examens

Affichage et sélection des séries

Étapes du protocole de lecture

Découpe écrans



**Clic droit sur une image pour accéder à toutes les fonctionnalités de SYNAPSE**

## Manipulation des images

<b>Défilement des outils : Fenêtrage, Zoom et Déplacement</b>	CLIC GCHÉ MAINTENU + CLIC DROIT
<b>Défilement des images</b>	MOLETTE SOURIS
<b>Défilement rapide des images (Mode ciné)</b>	CLIC MOLETTE + SOURIS
<b>Modification du format de découpe</b>	CTRL + MOLETTE SOURIS
<b>Afficher une image en plein écran depuis le format planche</b>	DOUBLE CLIC SUR L'IMAGE
<b>Repérage interactif orthogonal (IntelliLink)</b>	I + CLIC GAUCHE DANS L'IMAGE
<b>Défilement par quadrants mammaires.</b>	TOUCHE «Q» DU CLAVIER

## Mesures

<b>Mesurer une distance (Règle)</b>	R+ CLIC GAUCHE
<b>Mesurer un angle</b>	G+ CLIC GAUCHE
<b>Densité dans une région d'intérêt (ROI elliptique)</b>	E+ CLIC GAUCHE

## Divers

<b>Sélection image pertinente (Marquer l'image)</b>	B + CLIC SUR L'IMAGE
<b>Réinitialise les paramètres d'affichage de l'examen</b>	F5
<b>Réinitialise le fenêtrage</b>	9
<b>Préréglages de fenêtrage (Presets)</b>	PAVE NUMÉRIQUE DE 0 A 9
<b>Insérer du texte</b>	T+ CLIC GAUCHE
<b>Loupe (Roi Interactive)</b>	O+ CLIC GAUCHE
<b>Reconstructions MPR-MIP</b>	, + CLIC GAUCHE

## Comparaison d'examens

<b>Comparaison automatique de l'examen de même modalité, le plus proche chronologiquement de celui qui est affiché.</b>	ALT + C
<b>Arrêter une comparaison</b>	ALT + X
<b>Synchroniser manuellement des examens de dates différentes chez un même patient</b>	K + CLIC SUR LES SÉRIES À SYNCHRONISER